

よくあるご質問

ダウンタイムはありますか？

ほとんどありません。多くの患者様は、施術直後から通常の日常生活に戻ることができます。


Q: 治療時に痛みはありますか？

多くの患者様は、十分に耐えられる程度の刺激として感じられます。冷却システムにより、施術中の不快感を大幅に軽減します。

効果が現れるまでどのくらいかかりますか？

血管性病変や色素性病変の改善は、1〜3回の治療で効果を実感できる場合があります。脱毛効果は、通常4〜6回程度の施術を重ねることで徐々に現れます。スキンリジュビネーションの効果は、数か月かけて徐々に現れます。

さらに多くの臨床写真を見るには

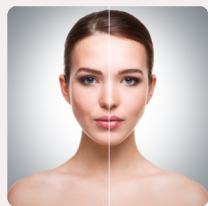

1. QRコードをスキャンしてください。
2. 「デバイス別に検索」メニューから SMATRION COMBI を選択してください。

適応症

脱毛

濃い毛・薄い毛 | 太い毛・細い毛
あらゆる身体部位 | あらゆる肌タイプ

血管性病変

そばかす | 脂漏性角化症 | 色素異常

色素性病変

毛細血管拡張症 | 青色血管病変 | 顔面紅潮
炎症性ニキビ | 酒さ（ロザケア） | ポートワイン母斑
血管腫 | クモ状静脈

フェイシャルリジュビネーション

しわ | 肌のたるみ

もっと詳しく知りたいですか？

QRコードをスキャンしてください！



www.ids.co.kr



治療動画

ids



脱毛
血管性病変
色素性病変
フェイシャルリジュビネーション

SMATRION COMBI

2波長による最大限の臨床効果


FDA CE

トップハットビーム


トップハットビームプロファイルは、照射スポット全体にレーザーエネルギーを均一に分布させることで、安定した予測可能な治療結果を実現します。また、この均一なエネルギー分布により、局所的なホットスポットによる副作用のリスクを最小限に抑えます。

デュアル波長

SMARTRION COMBIは、1064 nmと755 nmの2種類の波長を同時に照射することで、異なる深さに存在するさまざまなクロモフォア（光吸収体）を効果的にターゲットとすることができ、幅広い治療に対応する多用途なアプローチを提供します。

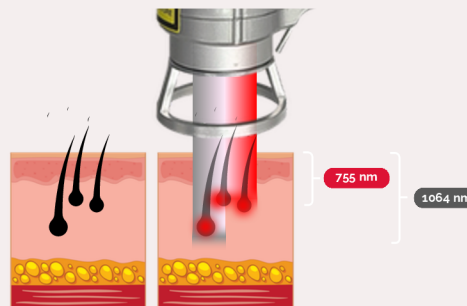

1064 nmと755 nmを同時に照射することで、太い毛や細い毛、黒い毛や白髪に近い毛、さらに異なる深さに存在する毛根まで、さまざまな毛質や毛の深さに合わせた脱毛治療が可能となり、包括的なソリューションを提供します。

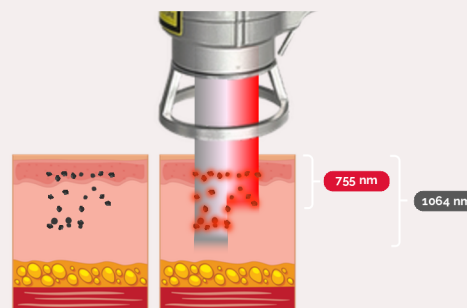

1064 nmと755 nmを同時に照射することで、色素性病変の治療も可能となり、異なる深さに存在する色素を効果的にターゲットとして照射できます。

施術の流れ

施術前

- 施術部位を十分に清潔にしてください。
- 4～6週間前から日焼けやタンニングを避けてください。
- レチノイドなどの一部のスキンケア製品は、医師の指示に従って使用を中止してください。
- 既往症や服用中の薬がある場合は、必ず施術前に医療従事者へお知らせください。

施術中

- 輪ゴムではじかれるような温かい刺激や、軽いピリピリとした感覚を感じる場合があります。
- 冷却装置（ガスまたはエアークール）を使用し、施術中の不快感を最小限に抑えます。
- 施術時間は治療部位によって異なりますが、通常1回あたり15～60分程度です。

施術後

- 軽度の赤み、腫れ、または熱感が生じる場合がありますが、冷却タオルやクールコンプレス（冷湿布）により緩和できます。
- 少なくとも1週間は直射日光を避け、SPF30以上の日焼け止めを使用してください。
- 48時間はピーリングなどの角質除去ケアや熱いお湯の使用を避けてください。
- 通常のスキンケアは、医療従事者の指示に従い、数日以内に再開できます。