

適応症


美容外科

鶏眼（うおめ） | いぼ | 汗管腫

美容フラクショナル

ニキビ跡 | しわ | 毛穴の開き
スキンリサーフェシング | ストレッチマーク
肌の引き締め | レーザーピーリング | シミ


臨床写真

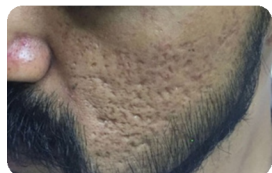

治療前



治療後

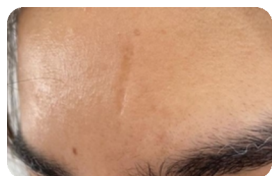

治療前



治療後



1. QRコードをスキャンしてください。
2. 「デバイス別に検索」メニューからSMAXELを選択してください。

よくあるご質問

回復期間はどのくらいですか？

治療の深さによって異なりますが、通常は軽度のリサーフェシングで2～5日、深部治療では7～10日程度です。

治療時に痛みはありますか？

ほとんどの患者様は軽度から中等度の不快感を感じます。快適性を高めるため、局所麻酔クリームを塗布します。

何回の治療が必要ですか？

1回の施術でも効果を実感できる場合がありますが、症状や治療目的に応じて、より良い結果を得るために2～4回程度の施術が推奨される場合があります。

もっと詳しく知りたいですか？

QRコードをスキャンしてください！



www.ids.co.kr



治療動画



SMAXEL

先進的なスキンリサーフェシング
& 病変除去

FDA CE

SMAXELとは何ですか？

SMAXELは、複数のハンドピースを使用し、さまざまな肌トラブルに対して高精度な治療を可能にする先進的なフラクショナルCO₂レーザーシステムです。

皮膚内に微細な熱凝固領域を形成するピクセル状のレーザービームを照射することで、周囲組織へのダメージを最小限に抑えながらコラーゲン再生を促進します。

これにより、より短い回復期間と少ない副作用で、効果的なスキンリジュベネーションを実現します。



フラクショナルハンドピース



ズームハンドピース



50 mmハンドピース



100 mmハンドピース

多彩なハンドピース

施術の流れ

施術前

- 1～2週間は日焼けやタンニングを避けてください。
- 医師の指示に従い、レチノイドやピーリングなどの角質除去製品の使用を中止してください。
- 肌の状態や服用中の薬がある場合は、必ず医師へお知らせください。

施術中

- 施術中の不快感を軽減するため、局所麻酔クリームを塗布します。
- 施術時間は治療部位によって異なりますが、通常15～30分程度です。
- 施術中は、温かさや軽いチクチクとした刺激を感じる場合があります。

施術後


- 数日間、赤み、腫れ、または皮むけが生じる場合があります。
- 日焼けを避け、毎日広範囲スペクトラムの日焼け止めを使用してください。
- 肌の保湿を保ち、医療従事者から指示されたアフターケアに従ってください。
- ダウンタイム：
 - 軽度のリサーフェシング：2～5日
 - 深部の病変・瘢痕治療：7～10日

瘢痕治療

フラクショナルCO₂レーザーは、集中したレーザー光を数千個の微細なマイクロビームに分割して照射します。

これらのマイクロビームは皮膚深部まで到達し、蒸散領域と凝固領域からなる制御された微細な熱作用部位を形成することで、新しいコラーゲンやエラスチン線維の生成を促進します。

その結果、損傷した皮膚組織がより健康的な新しい組織へと置き換えられ、時間の経過とともに瘢痕の外観が改善されます。

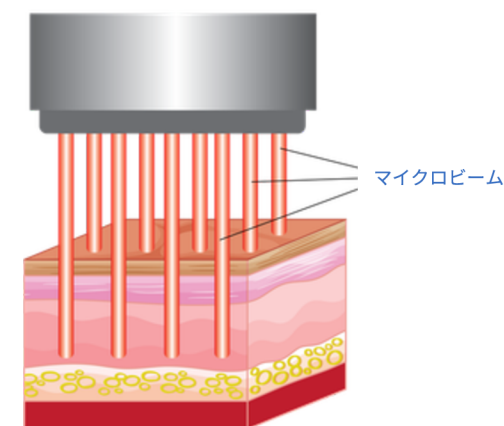

マイクロビーム

