

臨床写真




治療前



治療後




治療前

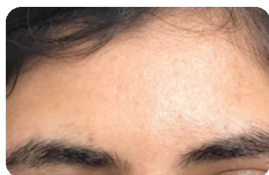

治療後



治療前

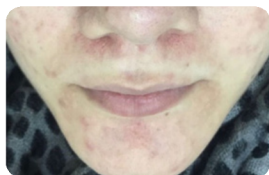


治療後



治療前



治療後

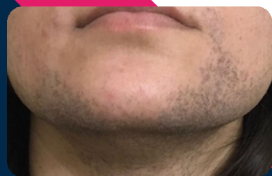

治療前



治療後

さらに多くの臨床写真を見るには



1. QRコードをスキャンしてください。
2. 「デバイス別に検索」メニューからSHINY PLUSを選択してください。

The Safest Treatment
Micro Pulsed Light

適応症

色素性病変

日光性色素斑 | そばかす
肝斑 | 炎症後色素沈着 (PIH)

スキンリジュビネーション

しわ | 毛穴の開き

ニキビ

尋常性ざ瘡

脱毛

脚の毛 | ワキ毛 | ビキニラインの毛

血管性病変

毛細血管拡張症 | 紅潮 | 酒さ (ロザケア)

もっと詳しく知りたいですか？

QRコードをスキャンしてください！



www.ids.co.kr



治療動画



SHINY PLUS

マイクロパルステクノロジーが実現する、
最も安全な治療

FDA CE

ids


SHINY PLUS

SHINY PLUSは、さまざまな皮膚トラブルを高い治療効果と最小限の副作用で改善するために開発された先進的な**MPL (Micro Pulsed Light) **デバイスです。

独自設計の140個のマイクロセルを備えたサファイアチップを採用しており、IPL治療で見られる「タイガーマーク」などの副作用の発生を効果的に抑えます。

マイクロパルステクノロジー

マイクロセル構造のサファイアチップは、光エネルギーを各マイクロセル内に限定して照射し、セル間にはセーフティゾーンを形成します。この設計により、健康な皮膚を保護し、あらゆる肌タイプに安全な施術を実現します。

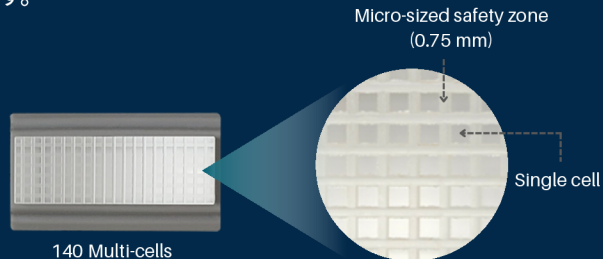

過度なIPL照射は、大きな水疱を引き起こし、炎症後色素沈着 (PIH) や瘢痕形成のリスクを高める可能性があります。SHINY PLUSは、代わりに微細な小水疱を形成することで、これらの重篤な副作用のリスクを最小限に抑えます。



直後



24時間後

意図的に過度な出力でSHINY PLUSを照射してから48時間後でも、1つの大きな水疱ではなく、小さな水疱のみが確認されました。

7種類のフィルター

交換可能な7種類のフィルターにより、さまざまな肌悩みやすべての肌タイプに合わせた、精密で最適な治療を実現します。



よくあるご質問

SHINY PLUSは、すべての肌タイプに安全ですか？

先進のマイクロパルステクノロジー、マルチセルサファイアチップ、そして7種類の専用フィルターにより、SHINY PLUSは明るい肌から濃い肌まで、あらゆる肌タイプに安全な治療を提供します

7種類のフィルターにはどのようなメリットがありますか？

7種類のフィルターにより、さまざまな皮膚症状に応じた最適な治療が可能になります。また、照射エネルギーを最適化することで、安全かつターゲットを絞った効果的な治療を実現します。

治療時に痛みはありますか？

ほとんどの患者様は快適に施術を受けられます。サファイアチップによる冷却効果により、施術中の不快感を軽減し、快適な治療を実現します。

治療時間はどのくらいですか？また、何回の治療が必要ですか？

治療時間は施術部位や症状によって異なりますが、通常15～30分程度です。効果は1回の施術でも実感できる場合がありますが、より理想的で持続的な結果を得るためには、通常3～6回の施術が推奨されます。

SHINY PLUSの施術後にダウンタイムはありますか？

ダウンタイムはほとんどありません。施術後に一時的な赤みが生じることがありますが、通常は数時間以内に落ち着きます。

