

よくあるご質問

治療時に痛みはありますか？

ほとんどの患者様は、施術中に軽い不快感や温かさを感じる程度です。必要に応じて、快適性を高めるために麻酔クリームを使用することがあります。

SONORAMAの治療時間はどのくらいですか？

治療部位によって異なりますが、1回の施術時間は通常30～60分程度です。

効果はいつ頃現れ、どのくらい持続しますか？

リフトアップ効果は施術直後から感じられる場合もありますが、新しいコラーゲンの生成に伴い、2～3か月かけてより高い効果が現れます。効果の持続期間は、肌の状態やライフスタイルによって異なりますが、通常12～18か月程度です。

SONORAMA治療後にダウンタイムはありますか？

ダウンタイムはほとんど、または全くありません。一部の患者様では、治療部位に軽い赤み、腫れ、または圧痛が生じることがありますが、通常は数時間から数日以内に自然に治まります。

適応症



スキンリジュビネーション



肌の引き締め



しわ改善



瘢痕治療



ニキビ治療



リフトアップ

もっと詳しく知りたいですか？

QRコードをスキャンしてください！



www.ids.co.kr

SONORAMA

高密度焦点式超音波で、
美しさを引き上げる。

CE



SONORAMAとは何ですか？また、どのように作用しますか？

SONORAMAは、高密度焦点式超音波（HIFU：High-Intensity Focused Ultrasound）を用いた非侵襲的な治療システムです。集束した超音波エネルギーを皮膚の深部へ届けることで、コラーゲンの生成を促進し、手術を行うことなく組織を引き締め、リフトアップ効果をもたらします。

①




集束超音波エネルギーがSMAS層をターゲットに照射されます。

②



超音波エネルギーにより、熱凝固が起こります。

③

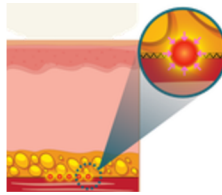

SMAS層が直ちに収縮し、引き締め効果が生じます。

④




肌の引き締めとリフティング効果が得られます。

SMAS層へダイレクトにアプローチ

SMAS（表在性筋膜群）は、皮膚の下、表情筋の上に位置する線維性組織で、顔の支えとなる重要な組織であり、フェイスラインや肌のハリを維持する役割を担っています。HIFUは、他のエネルギーデバイスと比較してより深部までエネルギーを到達させ、SMAS層を正確にターゲットとすることができるため、効果的なリフトアップと引き締めを実現します。

多層アプローチ治療

さまざまな深達度に対応したカートリッジを使用することで、それぞれ異なる深さへエネルギーを届け、三次元的な引き締めとリフトアップ効果を実現します。

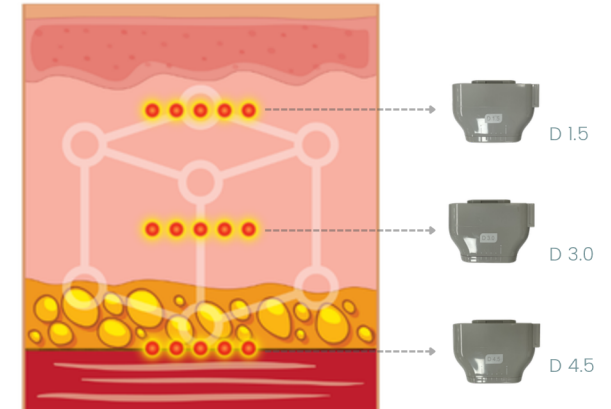

デュアルハンドピース


SONORAMAは、スタンダードハンドピースとペンタイプハンドピースの2種類を備え、治療部位や目的に応じた最適な施術を可能にします。



広範囲への照射が可能で、顔や身体の広い部位に適しています。

スタンダードハンドピース

額
頬
あご
首
腕
腹部
広範囲の部位

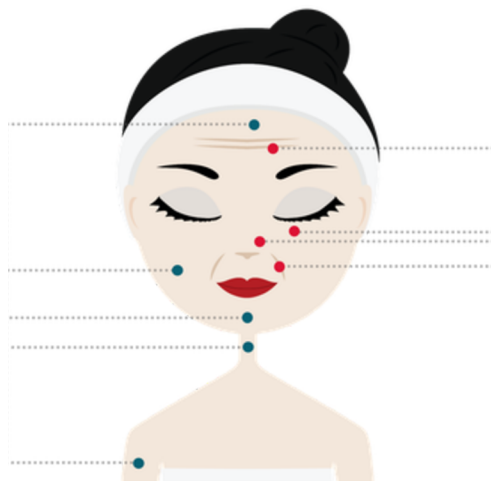


より細やかで集中的な施術が可能で、顔の狭い範囲への施術に適しています。

ペンタイプハンドピース

深いしわ
眼窩下部
狭い範囲
ほうれい線

さらに多くの臨床写真を見るには

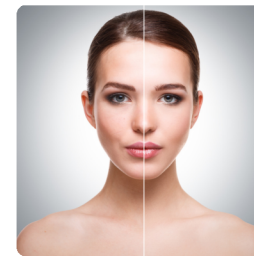

1. QRコードをスキャンしてください。
2. 「デバイス別に検索」メニューからSONORAMAを選択してください。

