

よくあるご質問

施術に痛みはありますか？

いいえ。CURELUXによるLEDセラピーは完全に痛みのない施術です。

施術中はやさしい温かさを感じる程度で、リラックスした状態で受けていただけます。

1回の施術時間はどのくらいですか？

一般的な施術時間は約15～30分です。

施術部位や改善を目的とする肌の悩みによって、所要時間は異なります。

効果を実感するには、何回の施術が必要ですか？

1回の施術でも改善を実感される方がいますが、より良い結果を得るためには、通常1週間間隔で4～6回の施術が推奨されます。

医師が患者様一人ひとりのニーズに合わせた治療プランを作成します。

臨床写真



施術前



施術後



さらに多くの臨床写真を見るには

1. QRコードをスキャンしてください。
2. 「デバイス別に検索」メニューからCURELUXを選択してください。

もっと詳しく知りたいですか？

QRコードをスキャンしてください！



www.ids.co.kr



Heal Naturally.
Recover Quickly.

CURELUX

身体本来の力を、光で引き出す。



ids

CURELUXとは？

CURELUXは、特定の波長の光を利用して肌にやさしく作用する、非侵襲型LED（発光ダイオード）セラピー機器です。肌の深部※へ光エネルギーを届けることで、肌状態の改善とトータルスキンケアをサポートします。優れた治療効果を実現するため、

CURELUXには先進のOptimized Lens Array（最適化レンズアレイ）設計が採用されています。

これにより、光強度を高め、浸透深度を向上させるとともに、治療エリア全体へLEDエネルギーを均一かつ安定して照射することが可能です。



最適化レンズアレイ

肌の内部では何が起こるのか？

LEDの光エネルギーは皮膚細胞に吸収され、細胞の「エネルギー工場」とも呼ばれるミトコンドリアを活性化します。これにより、細胞のエネルギー源であるATP（アデノシン三リン酸）の生成が促進され、肌の修復力向上、炎症の軽減、コラーゲンやエラスチンの生成促進をサポートします。

ブルーライト（415 nm）

ニキビの原因となる細菌にアプローチし、ニキビや肌荒れを抑制します。また、炎症を鎮静化し、ニキビの再発予防をサポートします。

レッドライト（660 nm）

コラーゲンとエラスチンの生成を促進し、小じわの改善、肌のハリ・弾力向上、傷の治癒促進をサポートします。

イエローライト（585 nm）

肌の色ムラや赤みの改善、血行促進に効果を発揮します。敏感肌のケアや、美容施術後の肌の鎮静ケアにも使用されます。

近赤外線（800 nm）

肌のより深い層まで到達し、細胞レベルでの修復と再生プロセスをサポートします。

CURELUXで治療できる症状

CURELUXは、異なる浸透深度を持つ特定の適応症に合わせて設計された、合計4種類の波長を搭載しています。また、1つのヘッドピースを使用する場合でも、最大3種類の波長を同時に組み合わせることが可能で、最大限の臨床効果を実現します。

415 nm



- アクネ（ニキビ）の改善をサポート
- 皮脂分泌を正常化
- 肌の鎮静とリラクゼーションを促進
- 肌表面の細菌除去をサポート
- ニキビの発生を予防
- ディープクレンジング効果を提供
- 開いた毛穴を引き締める

660 nm



- コラーゲンとエラスチンの生成を促進
- 肌のキメを整える
- 肌の弾力を向上
- 血行促進とリンパ循環をサポート
- シワや小じわを改善
- 色素沈着を軽減
- 発毛・育毛をサポート
- 乾癬（尋常性乾癬）の症状改善をサポート

585 nm



- 神経系およびリンパ系を刺激
- 損傷した組織の再生をサポート
- 肌の赤みやほてりを軽減
- 酒さ（ロザケア）の症状改善をサポート

830 nm



- 痛みの緩和をサポート
- 線維芽細胞の増殖を促進
- 身体のエイジングケア効果をサポート
- 細胞再生を促進
- 創傷治癒プロセスを促進
- 血行を改善

LEDセラピーの主なメリット

非侵襲的で痛みがない

ダウンタイムや回復期間が不要

熱や組織へのダメージがない

すべての肌タイプに安全

